



ZOLL® LifeVest®



**Volver a
la vida
con
LifeVest**

El chaleco desfibrilador más utilizado, estudiado y probado

LifeVest® es un chaleco desfibrilador cardioversor (WCD) que ha sido utilizado por más de un millón de pacientes con riesgo de muerte súbita cardíaca (MSC).¹ La mayoría de los pacientes utilizan LifeVest hasta que su afección mejora o hasta que su doctor toma una decisión relacionada a su cuidado médico a largo plazo.

¿Qué es un desfibrilador?

Un desfibrilador se utiliza para controlar ritmos cardíacos peligrosamente rápidos, como la taquicardia ventricular (TV) y la fibrilación ventricular (FV), mediante la aplicación de un choque eléctrico en el corazón. Algunos dispositivos desfibriladores se implantan debajo de la piel; en cambio, el LifeVest WCD se lleva puesto en contacto directo con la piel del paciente, debajo de la ropa que normalmente usa.



Cuando se utiliza según las indicaciones, el **LifeVest ofrece protección constante contra la MSC**

Todos los días, **decenas de miles de pacientes de todo el mundo tienen protección contra la MSC con LifeVest²**

En promedio, **LifeVest salva las vidas de aproximadamente tres pacientes al día³**



LifeVest le protege de la MSC

Su doctor cree que, debido a su afección actual, usted está en riesgo de sufrir muerte súbita cardíaca (MSC). Esto significa que puede desarrollar un ritmo cardíaco potencialmente mortal (conocido como "taquicardia ventricular" o "fibrilación ventricular").

A diferencia de un ataque al corazón, que puede ir acompañado de dolor de pecho intenso u otros síntomas, esos ritmos cardíacos peligrosos pueden producirse sin signos de que algo va a suceder. De repente usted se desmaya y no puede pedir ayuda. Si no recibe tratamiento, la muerte súbita cardíaca puede acontecer en cuestión de minutos. El tratamiento más eficaz para detener o corregir un ritmo cardíaco acelerado, potencialmente mortal, es la desfibrilación, que consiste en aplicarle un choque eléctrico en el corazón. LifeVest es muy eficaz para tratar estos ritmos cardíacos peligrosos.

También se ha demostrado que LifeVest mejora la supervivencia. En un estudio de 2,000 pacientes que utilizaron LifeVest, el 96 % de ellos continuó con vida un año después de empezar a usar el dispositivo.⁴

Comodidad y rendimiento probados


Liviano. Fácil de usar. Y lo más importante, eficaz. LifeVest cuenta con más de 20 años de confianza de brindar protección a los pacientes en riesgo.¹



El chaleco LifeVest es fácil de usar, ya que se lleva puesto debajo de la ropa que usted utiliza, en contacto con su piel.



El chaleco es liviano y no llama la atención, por lo tanto, le facilitará regresar cómodamente a sus actividades diarias.

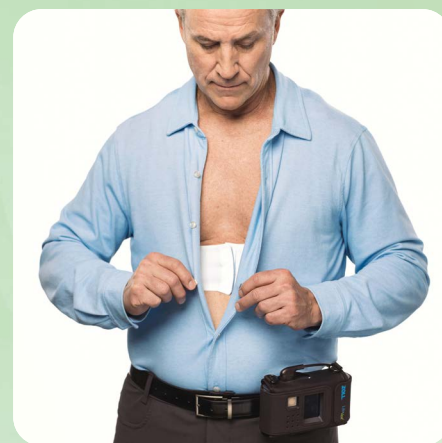

El monitor puede llevarse puesto alrededor de la cintura o colgando de una correa sobre el hombro.



Conozca LifeVest



Chaleco de tela liviana que permite el paso del aire

El chaleco LifeVest se diseñó y desarrolló tomando en consideración la comodidad del paciente y por lo tanto, está disponible en una amplia variedad de tamaños.



Velcro codificado por colores

El velcro codificado por colores permite un fácil montaje del cinturón de electrodos en el chaleco. Los electrodos están diseñados para detectar ritmos cardíacos peligrosos y administrar tratamiento automáticamente, si está indicado.



Monitor con pantalla táctil grande y fácil de leer

Una pantalla grande le permite ver mensajes importantes del dispositivo.

Botones de respuesta de fácil acceso

Ubicados en el monitor para ayudarle a interactuar con LifeVest.

Una de las funciones principales de LifeVest WCD es la serie de alertas y mensajes de voz que mantienen a los pacientes al tanto de lo que está haciendo el dispositivo. Estas alertas son parte del funcionamiento normal del dispositivo. Es especialmente importante que siempre pueda oír las alertas de LifeVest y responder a ellas.



Escanee aquí para ver un video en el que se explica cómo funciona LifeVest.

LifeVestPaciente.com

Confianza y tranquilidad

LifeVest está diseñado pensando en la comodidad y el rendimiento, de modo que pueda volver a realizar la mayoría de las actividades diarias con confianza y tranquilidad.⁵

Con LifeVest, no es necesaria la ayuda de otra persona ni de personal de emergencia para que funcione. Está diseñado para brindarle protección incluso cuando está solo o durmiendo. Por lo tanto, es fundamental que siempre lleve puesto el LifeVest. El único momento en que debe quitarse LifeVest es para tomar una ducha o un baño corto. De ser posible, esto solo debe hacerlo cuando se encuentra en casa acompañado.


Atención conectada*

Además de administrarle un tratamiento que le salva la vida, los datos que recoge LifeVest están disponibles para que el médico revise cómo está respondiendo su corazón al tratamiento médico. Además, si alguna vez siente la necesidad de grabar su ritmo cardíaco para que el doctor lo revise, LifeVest le permite hacerlo. Tenga en cuenta que el médico determina si revisa estos datos y cuándo lo hace.



Le ofrecemos apoyo en cada paso del camino

ZOLL ha apoyado a pacientes como usted durante más de 20 años.¹ Estamos aquí para ayudarle.

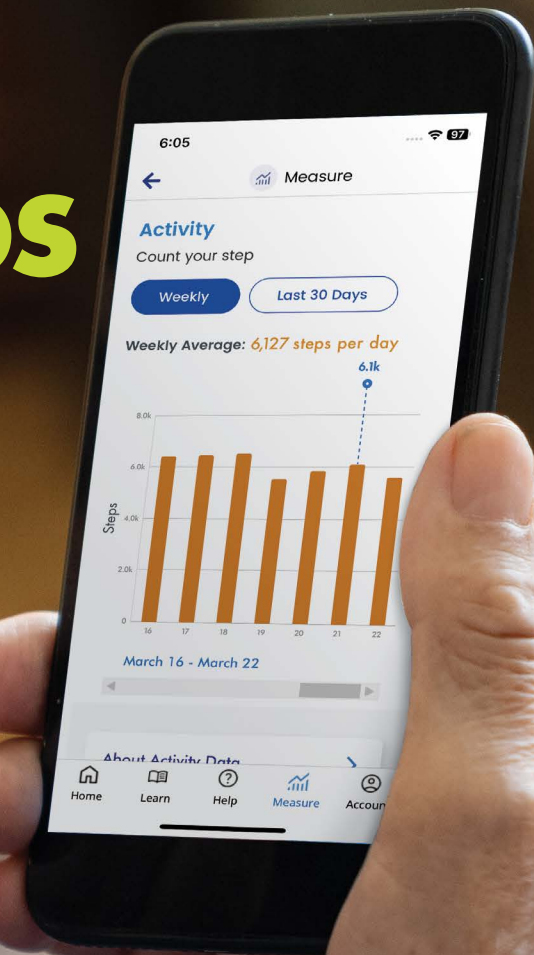

Capacitación y apoyo permanentes:
1.800.543.3267
LifeVestPaciente.com



Acceso a LifeVest

La mayoría de los planes de salud de los Estados Unidos, incluidos los planes comerciales, estatales y federales, tienen cobertura para LifeVest. Independientemente de su cobertura médica o de sus ingresos, ZOLL ofrece planes y programas financieros para garantizar que tenga acceso a LifeVest. Llámenos al 1.800.543.3267 para que hablemos sobre sus opciones.



Capacitación y asistencia en persona

ZOLL cuenta con el equipo de representantes de atención al paciente más importante y experimentado para ofrecer capacitación y asistencia al paciente en persona. Estos representantes le brindarán capacitación sobre el uso seguro de LifeVest durante su recuperación.



Aplicación ZOLL LifeVest para pacientes

Con LifeVest, el doctor y su equipo de atención al paciente pueden elegir tener acceso a datos sobre su salud cardíaca para ayudarle a manejar su plan de cuidado.* Con la aplicación ZOLL LifeVest para pacientes, que es opcional y fácil de usar, usted también puede hacerlo. Monitoree el tiempo que usa LifeVest cada día, realice un seguimiento del número de pasos que realiza y vea videos y contenido educativo. Actualmente, la aplicación para pacientes solo está disponible en inglés. Estamos trabajando para hacer disponible la versión en español.



Información para familiares y seres queridos

A su ser querido le recetaron LifeVest porque su doctor considera que está en riesgo de sufrir muerte súbita cardíaca. LifeVest está diseñado para protegerlo contra la MSC mientras el doctor evalúa su recuperación. Su ser querido recibirá capacitación exhaustiva acerca del LifeVest y podrá comunicarse con nuestro equipo de ayuda al paciente las 24 horas.

Obtenga más información sobre LifeVest y lo que puede hacer para brindar apoyo a su ser querido:

LifeVestPaciente.com

Llame a ZOLL las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 1.800.543.3267

ZOLL LifeVest®



Información importante

- El LifeVest no ofrece tratamiento para todas las afecciones cardíacas, como una frecuencia cardíaca peligrosamente lenta o un paro total del corazón, que son afecciones que no se tratan con un choque eléctrico de desfibrilación.
- *El LifeVest está diseñado para monitorear continuamente el ritmo cardíaco del paciente, administrarle tratamiento en caso de ser necesario y transmitir datos de salud del paciente después de que se descargan del dispositivo. El médico puede utilizar esa información para brindarle atención médica; no obstante, es importante que sepa que nadie revisa esos datos en tiempo real.
- Si cree que el paciente está teniendo una situación que es una emergencia médica, llame al servicio de emergencia.
- Los ambientes ruidosos o con vibraciones altas pueden hacer que sea difícil escuchar una alerta. Los pacientes que se encuentren en este tipo de ambientes o situaciones deben estar muy atentos al LifeVest WCD para asegurarse de que puedan responder a cualquier alerta. Por ejemplo, si está en una motocicleta o utilizando la cortadora del césped, puede producirse un nivel de vibración que haga difícil oír una alerta, lo que puede resultar en que reciba un tratamiento inadecuado.

Estamos aquí para brindarle ayuda. En cualquier momento.

Atención 24/7: 1.800.543.3267
Correo electrónico: LifeVest.Info@ZOLL.com
Sitio web: LifeVestPaciente.com




“LifeVest puede salvar vidas, y lo hace. Lo sé porque me salvó la vida. Estoy agradecido a LifeVest por permitirme seguir aquí para pasar tiempo con mi familia.”

Ricky L., 60 años, salvado por LifeVest después de 82 días

Pacientes reales. Historias reales.



A continuación, encontrará el testimonio de un paciente que utiliza LifeVest.

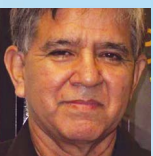

“La tranquilidad es lo mejor de LifeVest. Básicamente, es como estar en el hospital y ser monitoreado, pero en la comodidad de mi propio hogar, la comodidad de mi propia vida. Eso me ayudó a tranquilizarme más que nada.”

Paul S., 51 años, salvado por LifeVest después de 6 días



- 1 Basado en datos comerciales
- 2 Kutyifa V, Moss A, Klein H, et al. One-Year Follow-Up of the Prospective Registry of Patients Using the Wearable Defibrillator (WEARIT-II Registry). *Pacing Clin Electrophysiol.* 2018;1-7. <https://doi.org/10.1111/pace.13448>.
- 3 Datos en el archivo
- 4 Kutyifa V, Moss AJ, Klein U, et al. Use of the wearable cardioverter defibrillator in high-risk cardiac patients: Data from the prospective registry of patients using the wearable cardioverter defibrillator (WEARIT-II Registry). *Circulation* 2015;132(17):1613-1619.
- 5 Whiting J, Simon M. Health and lifestyle benefits resulting from wearable cardioverter-defibrillator use. *The Journal of Innovations in Cardiac Rhythm Management* 2012;1-2.

ZOLL® LifeVest®